

# Коннекторпаста ДУЦЕРА ЛЭЙ

## Инструкция по применению

### Инструкция по применению

Преимуществом коннекторпасты ДУЦЕРА ЛЭЙ является возможность легкого и равномерного нанесения. Кроме того значительно экономится время, так как штампики из ДУЦЕРА-ЛЭЙ не нужно больше погружать в насыщающую жидкость.

#### Назначение

Коннекторпаста фирмы ДУЦЕРА представляет собой керамическую пасту готовую к применению. Она покрывает – после обжига – поверхность массы для штампиков ДУЦЕРА-ЛЭЙ и надежно соединяет массу штампика и керамику.

#### Противопоказания

Не известны какие либо противопоказания.

#### Меры предосторожности

Может быть опасно для жизни при проглатывании или попадании в дыхательные пути. Содержимое и упаковку утилизировать в соответствии с требованиями по утилизации местного законодательства.

#### Меры предосторожности

ВАЖНО: Штампики нельзя обрабатывать насыщающей жидкостью!

Коннекторпаста является гидрофобной (отталкивает воду), она не должна соприкасаться с водой (образование шлиров).

#### Побочные действия

Не известны какие либо побочные действия.

#### Указания по работе:

Штампики из массы ДУЦЕРА ЛЭЙ изготовить как обычно.

После спекания тонким кроющим слоем нанести коннекторпасту прилагаемой кисточкой с коротким ворсом на сухую отпрепарированную поверхность охлажденного штампика из ДУЦЕРА ЛЭЙ. Дайте коннекторпасте стечь на 1-2 мм за границу препарирования. Для очищения кисточки применяйте очищающую жидкость ДУЦЕРА ЛЭЙ.

#### Указания по обжигу:

Предварительная сушка:	1 мин.
Предварительный нагрев:	3 мин.
Температура предварительного нагрева:	620 °C
Шаг подъема температуры:	55 °C под вакуумом
Конечная температура:	970 °C
Время выдержки:	1 мин.